

NeuroWorks® et SleepWorks™ de Natus® Consulter

Ouvrir une étude


Sélectionnez le nom du patient dans la liste de la base de données et double-cliquez ou cliquez sur le bouton **Review [Consulter]**.




Bouton Consulter

Parcourir l'étude

Les touches fléchées du clavier ou les boutons de pagination de la barre d'outils **Review [Consulter]** servent à passer d'une page à l'autre. Les flèches simples permettent de passer directement à la page suivante ou précédente. Pour démarrer la pagination automatique, appuyez sur la **barre d'espace** ou utilisez les **flèches doubles**. Pour stopper le mouvement, appuyez à nouveau sur la **barre d'espace** ou réutilisez les **flèches doubles**.

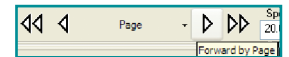

Sélectionnez le mode de navigation adéquat (par page ou par événement) et **Playback Speed [Vitesse de lecture]** (pages ou événements par seconde) à l'aide des commandes sur la barre d'outils **Review [Consulter]**.

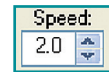

Changer de montage


Pour sélectionner un autre montage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran des courbes (les tracés de signaux) et sélectionnez le montage souhaité dans le menu. Pour changer les propriétés d'un canal spécifique, appuyez sur le bouton **Montage** dans la barre d'outils **Montage** pour ouvrir les propriétés de montage et utilisez l'éditeur pour modifier le montage.



Bouton Montage

Saisir un commentaire

On peut saisir des **commentaires pré-programmés** pendant l'enregistrement en cliquant sur les boutons de la barre d'outils **Note [Remarque]**.

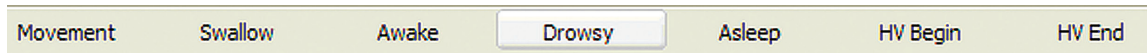

On peut saisir des remarques de **texte libre** en tapant sur le clavier.

Modifier les filtres / la sensibilité / la base de temps





On peut modifier les filtres et la sensibilité dans la barre d'outils **Montage**. Si la valeur souhaitée n'est pas proposée dans la liste déroulante, on peut manuellement la saisir dans le champ. Pour régler la base de temps (ou « taille de page »), cliquez sur la flèche déroulante à côté du réglage et sélectionnez l'une des bases de temps proposées.

Élagage

On utilise la fonction d'élagage pour isoler une section de l'étude à des fins d'examen par le médecin ou pour supprimer une section indésirable de la vidéo. Pour démarrer une séquence, déplacez la fine ligne rouge au niveau du triangle à l'endroit souhaité.

Cliquez sur le bouton **Start Marking Clip [Début de la séquence]** et saisissez un commentaire sur la séquence. Pour terminer la séquence, placez le curseur à l'endroit souhaité et cliquez sur le bouton **End Marking Clip [Fin de la séquence]**. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez créé toutes les séquences souhaitées. Pour créer une étude élaguée, cliquez sur le bouton **Edit Clips [Modifier les séquences]**. Cochez les séquences souhaitées et cliquez sur **Prune [Élaguer]**. Le système vous demandera si vous souhaitez découper des sections et les mettre dans une nouvelle étude ou supprimer la vidéo des sections qui n'ont pas été sélectionnées.

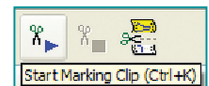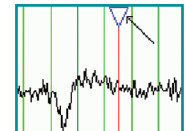

Consulter vidéo

Pour consulter la vidéo, cliquez sur le bouton **Camera** dans la barre d'outils **Review [Consulter]**. Cela permet d'activer et de désactiver l'affichage vidéo. On peut lire la vidéo en temps réel ou l'accélérer/la ralentir à l'aide des flèches doubles (en **Page Navigation Mode [Mode de navigation des pages]**).

