

1104BT-Katheter

Um mögliche Gesundheitsschäden des Patienten aufgrund falscher ICP-Messungen zu vermeiden, vor dem Implantieren des Katheters die nachfolgenden Schritte ausführen. Immer sicherstellen, dass der ICP-Wert des Katheters vor der Implantation, während sich der Katheter in der Luft befindet, auf null gestellt wird. Auf keinen Fall versuchen, die Einstellung auf null vorzunehmen, während sich der Katheter im Patienten befindet.

Einrichtung des Monitors

- Das schwarze LWL-Katheterkabel (CAMCABL) mit den Anschlüssen am Camino-Monitor verbinden.
 - Den ICP-Steckverbinder (P) des Kabels an dem mit ICP beschrifteten Anschluss befestigen, indem der rote Punkt auf dem Kabelsteckverbinder auf das rote Dreieck auf dem Monitoranschluss ausgerichtet und der Steckverbinder fest hineingedrückt wird.
 - Den Temperatursteckverbinder (T) des Kabels in den mit ICT beschrifteten Anschluss einstecken.
- Den entsprechenden Katheter anhand des auf der Kartonaußenseite angebrachten Etiketts identifizieren (siehe Abbildung des Etiketts rechts).
- Unter Berücksichtigung steriler Kautelen die innere Katheterschale aus der sterilen Verpackung nehmen und in das sterile Feld bringen.
- Unter Berücksichtigung von zur Wahrung der Sterilität geeigneten Kautelen den Vorverstärker-Steckverbinder am Ende des CAMCABL-Kabels mit dem schwarzen Wandler-Steckverbinder am Ende des Katheters verbinden.
- Die Monitoranzeige überprüfen, um den ICP-Messwert festzustellen.
 - Wenn der Wert nicht bei null liegt, auf die Schaltfläche SCALE (Skala) auf der Registerkarte MAIN (Hauptmenü) tippen, um einen Wellenformbereich von -10 bis 20 mmHg auszuwählen. Das Nulleinstellungswerkzeug aus dem Kathetersatz verwenden, um die Schraube auf der Unterseite des Wandler-Steckverbinders (Abbildung 1) zu drehen, bis auf der Monitoranzeige null angezeigt wird. Dazu die Wellenformlinie auf die Nullmarkierung im Diagramm ausrichten.
- Vor dem Implantieren des Katheters in den Patienten den Vorverstärker-Steckverbinder am Ende des CAMCABL-Kabels vom schwarzen Wandler-Steckverbinder am Ende des Katheters trennen.
 - Sicherstellen, dass der schwarze Wandler-Steckverbinder nicht unsteril wird.



Camino-Monitor



ICP- und ICT-Anschlüsse



CAMCABL

1104BT-Katheter und -Etikett


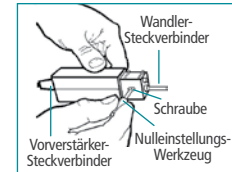



Abbildung 1

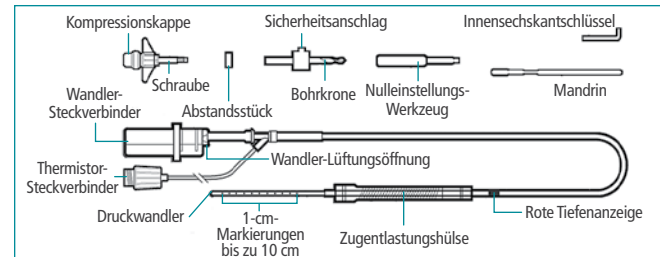

1104BT-Kathetersatz

Einführungsbereich

Die standardmäßigen rechten und linken präfrontalen Zonen sind die primären Einführungsbereiche.

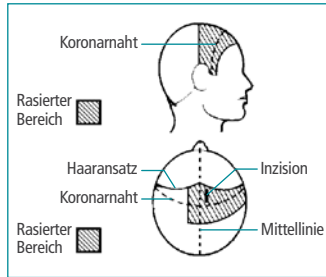

Der Sicherheitsanslag an der Bohrkrone kann nach Wunsch positioniert werden, indem die Stellschraube mit dem Innensechskantschlüssel gelöst, der Sicherheitsanslag in die gewünschte Position geschoben und die Stellschraube wieder festgezogen wird.


Platzierung des Katheters

1. Steriles Feld präparieren: Haare rasieren, Haut präparieren, Bereich abdecken, Hautschnitt vornehmen.
2. Mit der Bohrkrone aus dem Camino-Satz eine Trepanation durchführen und mit Kochsalzlösung spülen.
3. Zum Öffnen der Dura mit einer 18-G-Spinalkanüle einen Kreuzschnitt vornehmen.
4. Die Schädelschraube im Uhrzeigersinn in den Schädel einschrauben.
5. Mit dem Mandrin sicherstellen, dass der Weg durch den Schädel frei ist.

Die Wahl der Setztiefe der Schädelschraube liegt im Ermessen des Chirurgen und hängt von der Schädelstärke ab.

6. Vor dem Einführen des Katheters sicherstellen, dass er richtig auf null gestellt wurde.
7. Die Finger zwischen der 6- und 7-cm-Markierung positionieren und den Katheter durch den Schädelschraubenkanal einführen, bis die Finger die Oberseite der Schädelschraube berühren.
8. Den Katheter leicht zurückziehen und die Kompressionskappe festziehen, um den Katheter in Position zu fixieren.
9. Den Katheter wieder am CAMCABL-Kabel anschließen und die Wellenform auf dem Camino-Monitor- und/oder dem Bettmonitor überprüfen.
10. Den Temperatur-Thermistor vom Katheter am Temperatur-Steckverbinder des CAMCABL-Kabels anschließen.
11. Den Katheter festhalten und gleichzeitig die Zugentlastungshülse nach unten in Richtung Schädelschraube schieben. Dann den Katheter an der Kompressionskappe fixieren.


Wenn die rote Tiefenanzeige über der Zugentlastung sichtbar ist, sollte die Position der Katheterspitze überprüft werden, um zu gewährleisten, dass die gewünschte Tiefe erreicht wurde.

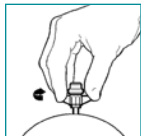


Schädelschraube platzieren




Weg mit Mandrin freimachen

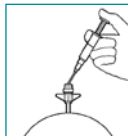


Spülen

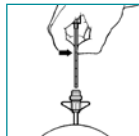


Finger zwischen 6- und 7-cm-Markierung platzieren und einführen, bis der Finger die Schädelschraube berührt

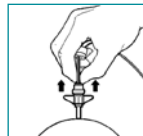

Katheter leicht zurückziehen

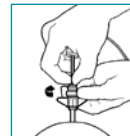

Kompressionskappe festziehen

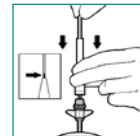

Katheter festhalten und Zugentlastungsrohr herunterziehen

Der Camino ICP-Monitor ist zur Messung des intrakraniellen Drucks und der intrakraniellen Temperatur im Parenchym durch qualifizierte Neurochirurgen oder Neurointensivmediziner indiziert.

Produkte und Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel: das Beste für Sie!

©2020 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken, deren Inhaber Natus Medical Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften sind oder für die Natus Medical Incorporated, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eine Lizenz besitzen bzw. für die sie werben oder die sie vertreiben. 024135B

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com