

## Auswertung

### Öffnen einer Untersuchung



Wählen Sie den Patienten aus der Datenbankliste aus und doppelklicken Sie auf den Patienten oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Auswertung**.



Schaltfläche „Auswertung“

### Navigieren in einer Untersuchung

Die Pfeiltasten auf der Tastatur oder die Seitendurchlauf-Schaltflächen auf der Symbolleiste **Auswertung** können zum Durchblättern der Seiten verwendet werden. Die Einzelpfeile blättern eine Seite auf einmal vorwärts und zurück. Zum Starten der automatischen Seitendurchläufe drücken Sie die **Leertaste** oder verwenden Sie die **Doppelpfeile**. Zum Stoppen des Durchlaufs durch die Untersuchung drücken Sie die **Leertaste** erneut oder klicken Sie erneut auf die **Doppelpfeile**.

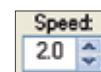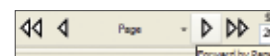

Wählen Sie den entsprechenden Navigationsmodus (nach Seite oder Ereignis) und die **Wiedergabegeschwindigkeit** (Seiten oder Ereignisse pro Sekunde) mit den Steuerelementen auf der Symbolleiste **Auswertung** aus.

### Anpassen der Montage

Wählen Sie eine andere Montage aus, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Wellen-Bildschirm klicken (auf die Signalkurven) und dann die entsprechende Montage aus dem Menü auswählen. Zum Ändern einzelner Kanaleigenschaften drücken Sie die Schaltfläche **Montage** auf der Symbolleiste **Montage**, um die Montageeigenschaften zu öffnen, und verwenden Sie den Montage-Editor zum Anpassen der Montage.



Schaltfläche „Montage“

### Eingeben von Anmerkungen

Sie können während der Aufzeichnung **vorprogrammierte Anmerkungen** eingeben, indem Sie auf die Schaltflächen auf der Symbolleiste **Note** (Notiz) klicken.



**Freier Text** kann eingegeben werden, indem Sie eine Notiz auf der Tastatur eingeben.


### Ändern von Filtern/Empfindlichkeit/Zeitbasis




Filter und Empfindlichkeit können mithilfe der Symbolleiste **Montage** geändert werden. Wenn die richtige Einstellung nicht auf der Dropdown-Liste verfügbar ist, kann der gewünschte Wert direkt in das Feld eingegeben werden. Die Zeitbasis (d. h. die „Seitengröße“) kann durch Klicken auf den Dropdown-Pfeil neben der Einstellung und Auswählen aus den verfügbaren Zeitbasen angepasst werden.

### Kürzen einer Untersuchung

Zum Ausschneiden von Abschnitten der Untersuchung zur Auswertung durch einen Arzt oder zum Entfernen unerwünschter Abschnitte des Videos kann die Kürzungsfunktion verwendet werden. Zum Starten eines Clips ziehen Sie zunächst den roten Haarlinien-Cursor mithilfe des „Dreiecks“ an die gewünschte Stelle.

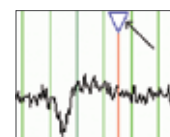

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start Marking Clip** (Markieren des Clips beginnen) und geben Sie einen Kommentar zum Clip ein. Zum Beenden des Clips platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle und klicken Sie auf die Schaltfläche **End Marking Clip** (Markieren des Clips beenden). Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Clips ausgewählt wurden. Zum Erstellen einer gekürzten Untersuchung klicken Sie auf die Schaltfläche **Edit Clips** (Clips bearbeiten). Überprüfen Sie die benötigten Clips und klicken Sie auf **Prune** (Kürzen). Sie werden aufgefordert, zu entscheiden, ob Sie die Abschnitte ausschneiden und in einer neuen Untersuchung platzieren möchten oder ob Sie das Video aus den nicht ausgewählten Abschnitten entfernen möchten.

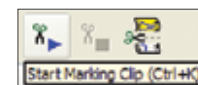

### Auswerten des Videos

Zum Auswerten des Videos klicken Sie auf die Schaltfläche **Kamera** auf der Symbolleiste **Auswertung**. Dadurch wird die Videoanzeige aus- und eingeschaltet. Das Video kann in Echtzeit abgespielt werden oder (im **Seitennavigationsmodus**) mithilfe der Seitendurchlauf-Doppelpfeile auch langsamer und schneller.

## Produkte und Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel: das Beste für Sie!

©2020 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken, deren Inhaber Natus Medical Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften sind oder für die Natus Medical Incorporated, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eine Lizenz besitzen bzw. für die sie werben oder die sie vertreiben. 026254.02

**natus**

Natus Medical Incorporated

natus.com