





Använda säkerhetsymboler:


Symbol	Innebörd
	Läs medföljande dokumentation
	Endast för engångsförbrukning
	Satskod / partinummer
	Datum för sista användning / förfallodatum

Endast för övervakad korttidsanvändning i sjukhusmiljö på prematurfödda spädbarn. Receptbelagt.

BRUKSANVISNING:

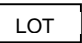Obs! Följ institutionspraxis för infektionskontroll och hudvård vid rengöring av hud, vid användning av hydrogelhäftplåster på prematurfödda spädbarns hud, samt vid fastställelse av lämplig tidslängd för användning och lämpligt avyttrande.

1. Avlägsna MiniMuffs hörselskydd från skyddspapperet och placera dem på spädbarnet ett i taget. Det spelar ingen roll i vilken riktning de placeras.


 **Varning!** Undvik att ytterörat viks eller böjs. Tvinga aldrig in stora öron i hörselskydden. Placera inte hörselskydden på sprucken hud.




2. Tryck försiktigt men stadigt ned hörselskyddens kanter på plats för att säkerställa bra förslutning. Undvik att placera hörselskydden på håriga områden. Tryck inte på hörselskyddets upphöjda mittpunkt.

Obs! Ljuddämpningen är beroende av bra förslutning. Kontrollera hörselskyddens förslutning när spädbarnet förflyttas.

3. Minska hydrogelens vidhäftning på känslig hud genom att lätt torka av hydrogelytan med en ren bomullstuss eller kompress innan hörselskyddet placeras på spädbarnet.

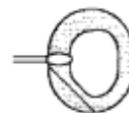




 **Varning!** Undersök huden i enlighet med institutionspraxis för hudvård. Ta bort hörselskydden om irritation, skavsår eller ödem uppstår.

4. Var försiktig då hörselskydden avlägsnas. Badda en blöt bomullstuss eller kompress under kanterna på hörselskyddet så att hydrogelen släpper. Håll emot den underliggande huden och lyft försiktigt upp hörselskyddet i kanterna.



Avyttra hörselskydden, som endast är avsedda för engångsbruk, på lämpligt sätt.

 Natus Medical Incorporated 5900 First Avenue S Seattle, WA 98108 USA +1 650-802-0400 • www.natus.com	  Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Germany • Tyskland
---	---