





Anvendte sikkerhedssymboler:

Symbol	Betydning
	Se vedlagte informationsmateriale
	Bør ikke genbruges til andre patienter
	Batchnummer
	Anvendes inden


Til kortvarig hospitalsbehandling af for tidligt fødte børn under konstant overvågning. Kun efter nærmere anvisning.

BRUGSVEJLEDNING:

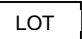Vigtigt! Følg hospitalets normale protokoller for infektionskontrol og hudpleje i forbindelse med rengøring af hud, brug af hydrogelklæber på præmatur hud, passende brugsvarighed og korrekt bortskaffelse.

1. Fjern MiniMuffs høreværn fra den beskyttende plastplade og placer et høreværn ad gangen på hvert af barnets ører. Kan placeres på følgende måder:





 **Advarsel!** Vær omhyggelig med ikke at folde eller bukke øret. Pres ikke store ører ind i høreværnet. Anvend ikke høreværnet på kompromitteret hud.

2. Pres høreværnets kanter støt og roligt på plads, så de slutter tæt til. Undgå at placere høreværnet over håret. Tryk ikke på midten af høreværnet.

Vigtigt! Støjreduktionen afhænger af, hvor tætsluttende høreværnet sidder. Kontrollér, om høreværnet stadig slutter tæt til, hvis barnet vendes.

3. For at forhindre at hydrogel klæber til følsom hud, dubbes hydrogelområdet med en ren vatpind eller gazeserviet, før høreværnet placeres på barnet.

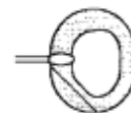



 **Advarsel!** Undersøg huden efter hospitalets gældende protokol for hudpleje. Indstil brugen af høreværnet, hvis der er tegn på irritation, slid eller væskeansamling.

4. Vær forsigtig, når høreværnet fjernes. Fugt en vatpind eller en gazeserviet og arbejd det forsigtigt ind under høreværnets kanter, så alt hydrogel løsnes. Understøt den underliggende hud og løft høreværnet forsigtigt i kanten.



Høreværn til engangsbrug bortskaffes efter hospitalets gældende regler.

 Natus Medical Incorporated 5900 First Avenue S Seattle, WA 98108 USA +1 650-802-0400 • www.natus.com	 CE Natus Europe GmbH Robert-Koch-Str. 1 82152 Planegg Germany • Tyskland
---	---