

Excepcional sistema para colocar  
a los pacientes quirúrgicos

# Olympic Vac-Pac

## Un método mejor y más seguro para colocar a los pacientes quirúrgicos

Olympic Vac-Pac lleva utilizándose más de 40 años en miles de hospitales, y en literalmente millones de operaciones, para mejorar la posición de los pacientes que van a someterse a operaciones quirúrgicas.

Las Vac-Pac son almohadillas suaves, disponibles en distintos tamaños y formas, rellenas de miles de pequeñas perlas de plástico. La almohadilla Vac-Pac forma primero un molde alrededor del paciente y posteriormente se le conecta un tubo de succión. Conforme se crea un vacío dentro de la Vac-Pac, la presión atmosférica exterior hace que las perlas se unan y que la Vac-Pac se vuelva rígida.

Cuando se desconecta el tubo de succión, la almohadilla Vac-Pac conserva su rigidez y su forma moldeada para sujetar y mantener firmemente al paciente. Una vez finalizada la operación quirúrgica, cuando se abre la válvula de la Vac-Pac para permitir que el aire vuelva a entrar, la Vac-Pac se ablanda de nuevo y ya queda lista para volver a utilizarse.

Además de proporcionar un posicionamiento más estable y cómodo para el paciente, las Vac-Pacs ahorran un tiempo muy valioso a todo el equipo del quirófano en cualquier intervención.



**1** La almohadilla Vac-Pac se coloca sobre la mesa del quirófano y sus perlas de plástico se reblandecen. Posteriormente el paciente se sitúa encima de la almohadilla Vac-Pac ya blanda.



**2** La Vac-Pac forma un molde alrededor del paciente para sujetarlo firmemente al mismo tiempo que ofrece un acceso óptimo a la zona sobre la que se va a realizar la intervención quirúrgica.



**3** Se conecta un tubo de succión y, en aproximadamente 15 segundos, la almohadilla Vac-Pac se vuelve rígida y mantiene sujeto al paciente.



**4** Se desconecta la succión, la válvula se cierra y el paciente queda colocado.



### Mayor comodidad

La Vac-Pac se adapta con comodidad al cuerpo del paciente.

### Sujeta al paciente firmemente

Las almohadillas Vac-Pac crean un molde para todo el cuerpo del paciente y sujetan con más firmeza que las bolsas de arena, los rollos de toallas y otros dispositivos.

### Ahorra tiempo

Con las Vac-Pacs, los pacientes pueden colocarse de un modo rápido y sencillo y, si es necesario, pueden ser recolocados durante una intervención quirúrgica.

### Mejor visión de la zona que va a ser intervenida


Las Vac-Pacs permiten colocar al paciente exactamente como lo desea el cirujano para obtener la mejor visión de la zona de la intervención.

### Extremidades accesibles

En muchas ocasiones, los pacientes con los que se usan las Vac-Pac pueden colocarse en posiciones que no se podrían conseguir fácilmente con el uso de otros dispositivos de posicionamiento. Los brazos y las piernas del paciente pueden maniobrarse todo lo que sea necesario, en muchos casos sin necesidad de cambiar la posición de la almohadilla Vac-Pac.

### Ayuda a evitar los puntos de presión

Una almohadilla Vac-Pac soporta el peso de todas las partes del cuerpo del paciente de manera uniforme. El peso del paciente se distribuye uniformemente, en lugar de que sean solamente las prominencias óseas las que lo soporten, lo que ocasiona lesiones en los puntos de presión.

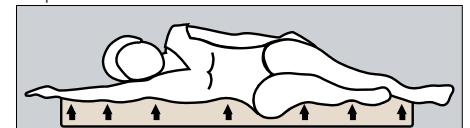



**Inmovilización de cabeza.** El tamaño 11 de la Vac-Pac proporciona estabilidad para la cabeza y la región facial durante cirugías plásticas y oftalmológicas.



**Soporte para todo el cuerpo.** El tamaño 40 de la almohadilla Vac-Pac proporciona un soporte cómodo para todo el cuerpo. Es ideal para procedimientos en los que se requiere una sedación consciente.



**Posición de tiroides.** Las Vac-Pac pueden proporcionar una excelente extensión mientras sostienen los hombros y la espalda.



**Posición para cirugía renal.** Las almohadillas Vac-Pac estabilizan al paciente sobre una mesa articulada y pueden cambiar rápidamente de forma después de realizar ajustes en la mesa del quirófano.



**Patas de rana.** Las almohadillas Vac-Pac ayudan a conseguir posturas difíciles de mantener y ofrecen un soporte cómodo para procedimientos de ginecología y obstetricia y de urología.



**Soporte para el cuello.** El tamaño 11 de la Vac-Pac y su corte en forma de "U" sujeta el cuello del paciente a la vez que mantiene accesible el área respiratoria.



**Acceso al hombro.** Las almohadillas Vac-Pac ofrecen un acceso completo a la zona en la que se va a realizar la intervención quirúrgica mediante procedimientos de artroscopia o cirugía abierta del hombro.



**Posición lateral.** Las Vac-Pac sujetan al paciente al mismo tiempo que proporcionan un acceso completo a la zona de la cirugía. Ideales para la cirugía que requiere posición lateral, como procedimientos de cadera u hombro, toracotomía, nefrectomía, liposucción y lipectomía circunferencial / con bandas, entre otros.

**Tamaño extra grande.** El tamaño 32 de la Vac-Pac está especialmente diseñado para cualquier posicionamiento lateral de pacientes de mayor envergadura y peso con el fin de ofrecer una mayor estabilidad.

## Sistema Olympic Vac-Pac...

7 tamaños y formas para adaptarse a cualquier posición que se necesite



**Tamaño 23**  
45,7 cm de ancho ×  
50,8 cm de largo  
(18" × 20")



**Tamaño 30**  
72,9 cm de ancho ×  
90,2 cm de largo  
(28,7" × 35,5")



**Tamaño 31**  
98,3 cm de ancho ×  
90,2 cm de largo  
(37,8" × 35,5")



**Tamaño 32**  
118,6 cm de ancho ×  
90,2 cm de largo  
(46,7" × 35,5")



**Tamaño 11**  
40,6 cm de ancho ×  
30,5 cm de largo  
(16" × 12")



**Tamaño 35**  
87,6 cm de ancho ×  
71,1 cm de largo  
(34,5" × 28")



**Tamaño 40**  
76,2 cm de ancho ×  
193,1 cm de largo  
(30" × 76")

**Distintas fuentes de vacío.** Utilice la succión instalada en la pared del quirófano, bombas de aspiración o cualquier otra fuente de vacío que haya cerca.

**Reutilizables.** Las almohadillas Vac-Pac se limpian fácilmente con desinfectantes líquidos habituales para que puedan seguir utilizándose en el quirófano durante muchos años. El tejido de PVC es suave y, a la vez, duradero, y no contiene látex de goma natural.

**Radiotransparente.** Excelente radiotransparencia con únicamente unos mínimos artefactos claramente identificables. Compatible con RMN.

**Instrucciones completas.** CD de formación sobre Vac-Pac con instrucciones e ilustraciones sobre posiciones y asistencia telefónica gratuita del personal de Natus Medical RN.

**Garantía.** Garantía de 1 año.

**Precios.** Descuentos disponibles por planes de renovación y por volumen.

**Fundas desechables Vac-Pac.** Las fundas desechables Vac-Pac son un accesorio de un solo uso que sirven para proteger las Vac-Pac de materiales adhesivos y manchas. Están fabricadas con un material envolvente quirúrgico no esterilizado y no contienen látex de goma natural.



### Información sobre cómo realizar pedidos

Artículo	Componente N°
Tamaño 30, 30 por caja	VPC30
Tamaño 31, 30 por caja	VPC31
Tamaño 32, 30 por caja	VPC32
Tamaño 40, 15 por caja	VPC40

Para obtener más información o realizar pedidos

**Llame al 1-800-426-0353** (opción N° 4)

(Teléfono gratuito en EE. UU. y Canadá)

**Llame al 1-206-767-3500** (opción N° 4)

(Internacional)

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con un único objetivo. Usted.

©2020 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas. 011256D

**natus**

Natus Medical Incorporated

natus.com