



OTOSuite är en programvaruplattform som stödjer flera mätinstrument, till exempel den audiometer som du använder. Andra instrument som stöds är till exempel immitansinstrument eller PMM (Probe Microphone Measurements "IF").

Du kan komplettera mätningen i AuditBase med andra tester som bara finns tillgängliga i OTOSuite. Från OTOSuite-kontrollpanelen i AuditBase kan du öppna OTOSuite i helskärmsläge genom att klicka på knappen OTOSuite.


AuditBase öppnar automatiskt OTOSuite i helskärmsläge om du aktiverar funktioner som inte finns representerade på OTOSuite-kontrollpanelen i AuditBase. Bland dessa funktioner finns:

- Alla funktioner i OTOSuite som inte finns på fliken Tone
- Funktioner på fliken Tone som inte stöds av i OTOSuite-kontrollpanelen i AuditBase, till exempel funktionen Tala till assistent


AuditBase öppnar till exempel OTOSuite i helskärmsläge om du aktiverar någon av följande funktioner:

- Talaudiometri
- Särskilda tonaudiometritester
- Immitanstestning, PMM (Probe Microphone Measurements "IF"), osv.


När du arbetar i OTOSuite kan du utnyttja talspelaren och audiometers ljudgenereringsfunktioner fullt ut. Du kan också använda andra mätyper som inte finns tillgängliga i OTOSuite utan att starta NOAH-moduler.

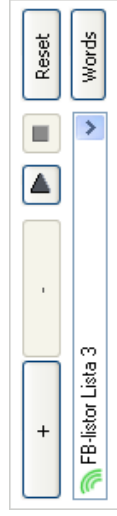

Bilderna visar funktionerna Playing och Scoring i modulen för talaudiometri i OTOSuite

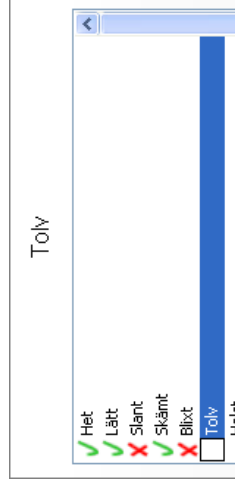

Om du läser in ett användartest i OTOSuite-kontrollpanelen i AuditBase som innehåller alternativ som inte finns representerade på den här kontrollpanelen, öppnar AuditBase automatiskt motsvarande testskärm i OTOSuite i helskärmsläge. Om du vill stänga OTOSuite-fönstret och återgå till AuditBase klickar du på knappen AuditBase i verktygsfältet i OTOSuite, eller så använder du snabbkommandot **O** (i modulen för audiometri) eller **Alt+F4** (i andra moduler).

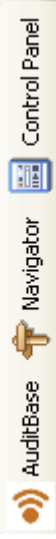

Skapa och redigera användartester

Alla konfigurationer och inställningar administreras i OTOSuite, till exempel att skapa och redigera användartester.

Lagring av OTOSuite-data

Det är inte säkert att alla mätvärden du genererar i OTOSuite visas i AuditBase. Däremot registreras alla insamlade data i OTOSuite för den aktuella AuditBasepatienten. Du kan visa informationen i OTOSuite när som helst, oavsett om du startar OTOSuite som en NOAH-modul eller genom OTOSuite-kontrollpanelen i AuditBase.

VIKTIGT! Mer fullständig information om säkerhet finns i användarmanualen till OTOSuite, samt i dokumentationen till din audiometer. De innehåller information och varningar som du måste följa för att säkerställa säker användning av OTOSuite och din audiometer. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas.

Tillevkare

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, DK-2630 Taastrup, Danmark
Telefon: +45 45 75 55 55, Fax: +45 45 75 55 59

E-post: info@gnotometrics.dk; www.otometrics.com

Tillevkarens ansvar

Tillevkaren reserverar sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftssäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning som servats eller repareras av annan part.

Copyright © 2011, GN Otometrics A/S

All information och alla illustrationer och specifikationer i den här guiden baseras på den senaste produktinformationen tillgänglig vid tiden för publiceringen. GN Otometrics A/S reserverar sig rätten att när som helst göra ändringar utan föregående meddelande.

Teknisk support

Kontakta din GN Otometrics-leverantör.