

Solução Visão Negada

Preparação

1. Não testar em uma sala completamente escura.
Embora possa parecer pouco intuitivo, para melhores resultados alguma luz ambiente é benéfico para o paciente.
2. Para pacientes com cílios longos, é recomendado que remova qualquer rímel. O depósito de maquiagem dentro da janela preta da concha do olho direito (através da qual a pupila é rastreada e o olho é gravado) afeta adversamente ambos.

Importante • NÃO TOCAR NA JANELA PRETA

Ao manusear a concha do olho direito, não toque a janela preta. A oleosidade da pele reduz a eficácia do revestimento de anti-embaçamento da janela. As impressões digitais tornam difícil acompanhar a pupila.

3. Obter uma visão negada (inclui uma concha para o olho direito e um adesivo protetor para o olho esquerdo).




4. Informar o paciente que ele ficará no escuro completo por um curto período. Assegure o paciente que, apesar dele não conseguir enxergar, a câmera da máscara pode gravar os movimentos do olho.

Colocação da concha no olho direito


1. Remova o plástico da parte de trás da concha. Remova cuidadosamente para não rasgar a concha ou desprender o adesivo.
2. Orientar o paciente a arregalar os olhos.

Nota • É mais fácil posicionar a concha se você e o paciente estiverem sentados no mesmo nível.

3. Orientar o paciente a olhar para a frente. Você quer a pupila no centro da janela preta.
4. Se a pálpebra do paciente for caída, mantenha ela erguida quando estiver colocando a concha. Isso vai garantir que o olho do paciente ficará bem aberto durante o teste.
5. Dobre a extremidade interna da concha colocando o cume encostado do lado direito do nariz.

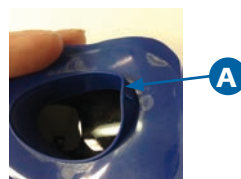

A. Cume

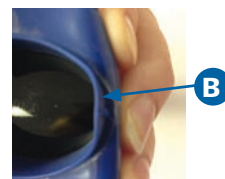

B. Dobrar para trás a extremidade interna

6. Tenha certeza que a concha esta centralizada sobre o olho (nem muito para cima ou para baixo).

Importante • NÃO TOCAR NA JANELA PRETA

Ao manusear a concha do olho direito, não toque a janela preta. A oleosidade da pele reduz a eficácia do revestimento de anti-embaçamento da janela. As impressões digitais tornam difícil acompanhar a pupila.

7. Pressionar gentilmente em torno das bordas para certificar uma vedação por toda a volta. A concha fica levemente apertada.

Colocação do adesivo no olho esquerdo

1. Remova o plástico da parte de trás do adesivo.
2. Peça para o paciente fechar o olho.
3. Posicione o adesivo com o lado mais largo em direção ao nariz. Certifique-se que o adesivo esta centrado sobre o olho (NÃO inclinado para cima ou para baixo).
4. Pressione gentilmente as bordas para certificar uma boa vedação. Tenha certeza de que o adesivo esta levemente apertado.

Verificar leve pressão

1. Dê ao paciente alguns minutos para ajuste dos olhos.
2. Pergunte ao paciente se ele pode ver qualquer luminosidade. NÃO deixe o paciente olhando diretamente para lâmpada (spot, incandescente).
3. Com a visão negada pela concha e pelo adesivo, e o paciente não tendo visão alguma de luz, prossiga ajustando a máscara no paciente.



Colocação da máscara sobre a solução da visão negada

Nota • Antes de colocar a máscara tenha certeza de que esta usando uma nova espuma.

1. No software OTOsuite Vestibular, abra o teste **Oculomotor** ou **Grupo de teste** Posicional, ou, o **Grupo de Teste** de Vídeos **Vídeo Record/Playback**.
2. Posicionar a máscara no paciente com a concha centralizada dentro da máscara.
3. Apertar o elástico de modo que a máscara permaneça no paciente durante o teste, mas NÃO precisa ser tão apertado como é necessário para o vHIT.

Nota • O elástico só tem de ser apertado o suficiente para a máscara permanecer na posição durante os testes (nistagmo espontâneo, semi espontâneo, posicional). Não precisa apertar o elástico tão apertado como é necessário para os testes de impulso cefálico. Um elástico muito apertado, mais o uso da concha pode causar um desconforto e deixar a gravação dos movimentos mais difícil.

4. Verifique que o olho esta centralizado dentro da janela da concha.

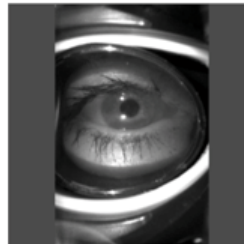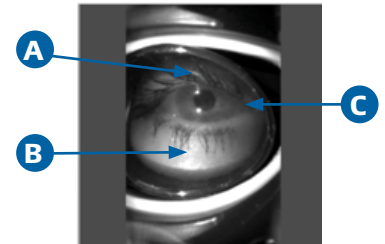Boa Posição**Posição Não Adequada**

- A. Não centralizado verticalmente: Deve ver mais a pálpebra acima do olho.
- B. Não centralizado verticalmente: Deve ver menos a área abaixo do olho.
- C. Não centralizado horizontalmente: Borda interna da concha não está suficientemente próxima do nariz. Observe o canto do olho na borda da concha.

Remoção da concha de visão negada e adesivo

Nota • Remover devagar a concha e o adesivo é muito mais confortável do que removê-los rapidamente.

1. Peça para o paciente fechar os olhos.
2. **SUAVEMENTE** puxe a concha e o adesivo da face do paciente.