

AURICAL® OT0cam 300

AURICAL OT0cam 300 e o Módulo Vídeo de Otoscopia

Guia do Usuário

Doc no. 7-50-1330-PT/04
Referência 7-50-13300-PT

CE


otometrics

Aviso de copyright

© 2014, 2016 GN Otometrics A/S. Todos os direitos reservados. ® Otometrics, the Otometrics Icon, AURICAL, MADSEN, ICS e HORTMANN são marcas registadas de GN Otometrics A/S nos EUA e/ou outros países.

Data de publicação da versão

30-09-2016 (143310)

Apoio técnico

Contacte o fornecedor.

Índice

1	Introdução	4
2	Finalidade de utilização	4
3	Convenções tipográficas	4
4	Desembalar OTOcam 300	5
5	Montar OTOcam 300	5
6	Ligar e desligar AURICAL OTOcam 300	7
7	O suporte do AURICAL OTOcam 300	7
8	Capturar e editar imagens com Vídeo de Otoscopia	7
9	Assistência, limpeza e manutenção	11
10	Outras referências	12
11	Acessórios	13
12	Especificações Técnicas	13
13	Fabricante	15
14	Notas de aviso	15
15	Notas sobre CEM (compatibilidade eletromagnética)	17
16	Definição de símbolos	19

1 Introdução



AURICAL OTOcam 300 é um vídeo de otoscopia (VO) para inspecionar visualmente e capturar imagens do canal auditivo, da membrana do tímpano ou outras aplicações semelhantes. AURICAL OTOcam 300 é utilizado em conjunto com o módulo de Vídeo de Otoscopia OTOsuite para capturar e editar imagens.

2 Finalidade de utilização

AURICAL OTOcam 300 e o módulo de Vídeo de Otoscopia OTOsuite

Utilizadores: Audiologistas, vendedores especializados de aparelhos auditivos, médicos ORL e outras pessoas qualificadas. Note que os regulamentos locais podem definir os utilizadores de vídeo-otoscopia de forma diferente. Os regulamentos locais devem ser sempre cumpridos.

Utilização: Para inspecionar visualmente o canal auditivo e a membrana do tímpano e para capturar e armazenar imagens do canal auditivo e da membrana do tímpano, ou outras aplicações semelhantes.

Espéculos com gestão de cerúmen

Note que a utilização dos espéculos com gestão de cerúmen pode necessitar de formação especial para autorizar o pessoal a realizar a remoção de cerúmen. Estes requisitos são definidos localmente. A Os regulamentos locais devem ser sempre cumpridos. GN Otometrics A/S não pode ser responsabilizada pela utilização não autorizada de espéculos.

3 Convenções tipográficas

A utilização de Aviso, Precaução e Nota

Para captar a sua atenção para as informações relativas ao uso seguro e apropriado do dispositivo ou software, o manual utiliza as seguintes recomendações de prudência:

Aviso • indica que existe risco de morte ou ferimentos graves para o utilizador ou paciente.

Atenção • indica que existe risco de ferimentos para o utilizador ou paciente ou risco de danos em dados ou no dispositivo.

Nota • indica que deve tomar especial atenção.

4 Desembalar OTOCam 300

1. Desembale cuidadosamente o dispositivo.
Quando tiver desembalado o dispositivo e os acessórios, guarde o material da embalagem nos quais foram entregues. Se tiver de enviar o dispositivo para assistência, o material da embalagem original protege-o contra danos durante o transporte, etc.
2. Inspeccione visualmente se o equipamento apresenta possíveis danos.
Se tiverem ocorrido danos, não coloque o dispositivo em funcionamento. Contacte o seu distribuidor local para obter assistência.
3. Verifique com a guia de transporte para assegurar que recebeu todas as peças e acessórios necessários. Se a sua embalagem estiver incompleta, contacte o seu distribuidor local.


4.1 Armazenar o OTOCam 300

Caso necessite armazenar o AURICAL OTOCam 300 antes de o colocar em funcionamento, siga as orientações abaixo:

- Armazene o AURICAL OTOCam 300 e os acessórios nas caixas fornecidas para proteger o equipamento de danos.
- Armazene o AURICAL OTOCam 300 e os acessórios num ambiente seco.

5 Montar OTOCam 300

Só é necessário montar o suporte. Utilize a chave Allen, parafusos e arruelas fornecidos para montar o suporte conforme ilustrado.

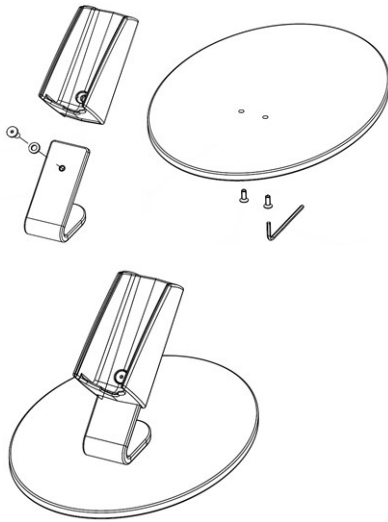

5.1 Instalar OTOSuite

Instale OTOSuite no PC antes de ligar a AURICAL OTOCam 300 a partir do PC.

Para obter instruções sobre a instalação do OTOSuite, consulte o OTOSuite Manual de instalação, que pode encontrar no suporte de instalação do OTOSuite (disco ou pen USB).

5.2 Ligar OTOCam 300 a OTOSuite

1. Ligue o cabo USB do AURICAL OTOCam 300 a uma das portas USB do computador.

AURICAL OTOCam 300 é alimentado através da ligação USB ao PC.



Se estiver a utilizar AURICAL OTOCam 300 em conjunto com AURICAL Aud, como alternativa pode ligar AURICAL OTOCam 300 a uma das ligações USB na traseira de AURICAL Aud.

2. Inicie OTOSuite e selecione o módulo de Vídeo de Otoscopia OTOSuite.

AURICAL OTOCam 300 é ligado automaticamente ao módulo de Vídeo de Otoscopia OTOSuite.

6 Ligar e desligar AURICAL OTOcam 300

Ligar o AURICAL OTOcam 300

1. Inicie o computador.
2. Ligue o cabo USB do AURICAL OTOcam 300 a uma das portas USB do computador.
3. Inicie o OTOSuite e selecione o módulo **Video Otoscopy** (Vídeo de Otoscopia).
 - Se o OTOcam 300 não estiver no suporte, o feixe de luz é ligado.
 - Se o OTOcam 300 estiver no suporte, o feixe de luz não é ligado.

Aviso • Não olhe diretamente para o feixe de luz, nem aponte o feixe de luz na direção dos olhos de outras pessoas. O feixe de luz pode danificar os olhos.

Desligar AURICAL OTOcam 300

Para desligar o OTOcam 300, desligue o cabo USB do computador ou desligue o computador.

7 O suporte do AURICAL OTOcam 300

O suporte é um suporte multifuncional para quando o AURICAL OTOcam 300 não está a ser utilizado. Este controla a fonte de luz e o aquecimento da ponta da câmara.

Quando AURICAL OTOcam 300 está colocado no suporte, a fonte de luz é desligada e o aquecimento da ponta da câmara é ligado.

Evitar a condensação


No AURICAL OTOcam 300 o aquecedor incorporado pré-aquece a ponta da câmara para que a diferença de temperatura entre a ponta da câmara e o ar dentro do canal auditivo seja mínima. A função de pré-aquecimento é ativada quando o AURICAL OTOcam 300 é ligado ao PC (que está ligado) e colocado no suporte. Para que o pré-aquecedor aqueça a ponta da câmara à temperatura do corpo, o AURICAL OTOcam 300 deve permanecer no suporte durante aproximadamente 5 minutos antes da câmara ser utilizada.

8 Capturar e editar imagens com Vídeo de Otoscopia

O ecrã **Video Otoscopy** (Vídeo de Otoscopia) está dividido em três secções principais.


Antes de capturar imagens

Se o AURICAL OTOcam 300 estiver ligado, o módulo **Vídeo-otoscopia** (Video Otoscopy) é aberto mostrando uma imagem ao vivo.

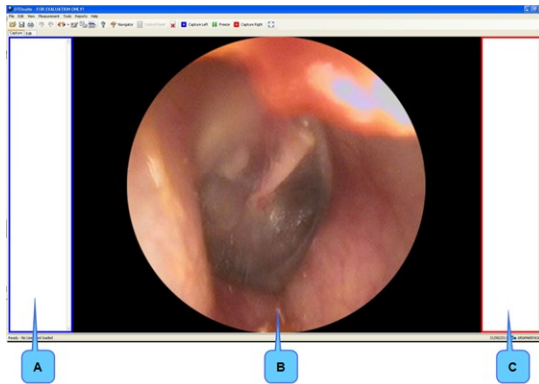

- A. Painel de Imagem da Esquerda
- B. Área de Trabalho Principal
- C. Painel de Imagem da Direita

Depois de capturar as imagens

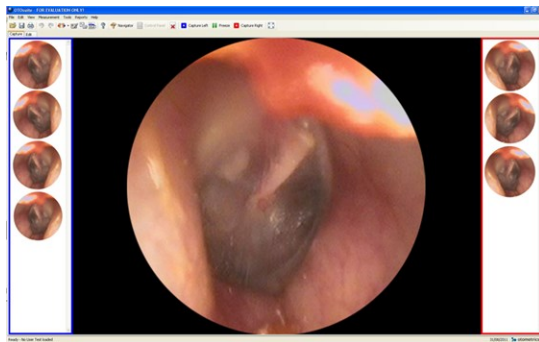


Os **Picture Panels** (painéis de imagem) da esquerda e da direita listam as imagens que capturar.





8.1 Modo de captura

No modo **Capture** (Capturar) pode inspecionar o ouvido e capturar imagens com OTOcam 300.

A barra de ferramentas Capture (Capturar)



Apagar todas as imagens	
	Elimina todas as imagens capturadas nesta sessão.

Ícone	AURICAL OTOcam 300	Atalho	Capturar
		L	Capturar a imagem como Ouvido esquerdo (Left Ear).
		R	Capturar a imagem como Ouvido direito (Right Ear).

Parar

É possível parar uma imagem antes de a capturar como uma imagem.



1. Para parar a imagem, clique no ícone **Parar** (Freeze) na barra de ferramentas ou prima a **barra de espaço**.
2. Se necessário, clique no ícone **Parar** (Freeze) ou prima a **barra de espaço** para anular a paragem da imagem.

Modo de ecrã completo



Apresenta uma vista em ecrã inteiro da imagem selecionada. Prima **Esc** para regressar ao modo de visualização normal.

8.2 Capturar uma imagem

1. No OTOSuite, clique em **Capturar** (Capture) na secção **Vídeo-otoscopia** (Video Otoscopy) do **Painel de Navegação** (Navigation Panel). O módulo **Vídeo-otoscopia** (Video Otoscopy) é iniciado e AURICAL OTOcam 300 fica ativo.

Aviso • Não olhe diretamente para o feixe de luz, nem aponte o feixe de luz na direção dos olhos de outras pessoas. O feixe de luz pode danificar os olhos.


2. Prima um espéculo na ponta do AURICAL OTOcam 300.

Aviso • Tenha cuidado ao inserir o espéculo no ouvido do paciente - existe o risco de danificar a parede do canal auditivo e/ou a membrana do tímpano.

Os espéculos devem ser eliminados após uma única utilização.

3. Insira o espéculo no AURICAL OTOcam 300 no ouvido do cliente.

4. Quando tiver obtido uma imagem satisfatória, prima o botão **Ouvido direito** (Right Ear) ou **Ouvido esquerdo** (Left Ear) no AURICAL OTOcam 300.

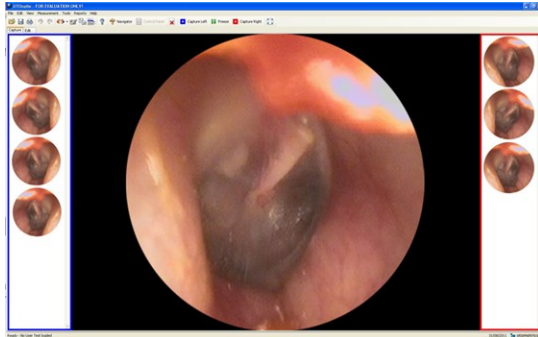



8.3 Modo de edição


No modo **Editar** (Edit), pode adicionar marcadores e comentários às imagens individuais.


A barra de ferramentas Edit (Editar)



Apagar todas as imagens	
	Elimina todas as imagens capturadas nesta sessão.

Marcadores	
	
<ul style="list-style-type: none"> • Clique no marcador pretendido na barra de ferramentas Editar (Edit). • Posicione o cursor no ponto onde pretende colocar o marcador e clique uma vez. 	

Ferramenta para apagar	
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecione a ferramenta Apagador (Eraser) e clique no marcador que pretende remover.


Ferramenta de apontar	
	<p>A ferramenta Apontador (Pointer) é selecionada por predefinição.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando já não pretender utilizar a ferramenta Apagador (Eraser) ou uma ferramenta Marcador (Marker), clique na ferramenta de apontar na barra de ferramentas.


Funções de clique com o botão direito do rato

É possível clicar com o botão direito do rato numa imagem num dos **Painéis de Imagens** e, no modo **Editar** (Edit), também é possível clicar com o botão direito do rato na imagem central.


Apagar	
	Elimina a imagem selecionada.


Editar	
	Seleciona a imagem para edição.

Copiar para a área de transferência	
	Copia a imagem selecionada incluindo os marcadores para a área de transferência. É possível colar a imagem em outros programas de software.

Mudar ouvido	
	Atribui uma imagem ao outro ouvido.

Funções de clique com o botão direito do rato na imagem central

Remover todos os marcadores	
	Clique com o botão direito do rato em qualquer parte da imagem central e seleccione Remover todos os marcadores (Remove All Markers).

Remover marcador	
	Clique com o botão direito do rato num marcador na imagem central e seleccione Remover marcador (Remove Marker).

9 Assistência, limpeza e manutenção

Aviso • Nunca desmonte o OTOcam 300. Contacte o fornecedor. As peças dentro de OTOcam 300 só devem ser verificadas ou reparadas por pessoal autorizado.

9.1 Assistência e reparação

Para garantir a segurança e para não anular a garantia, a assistência e a reparação do equipamento elétrico médico devem ser efetuadas apenas pelo fabricante do equipamento ou por pessoal de assistência em oficinas autorizadas. Em caso de qualquer defeito, faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e contacte o seu fornecedor. Não utilize um dispositivo defeituoso.

Nota • Não existem peças no interior da caixa de OTOcam 300 para serem assistidas pelo utilizador.

9.2 Limpeza

Nunca utilize objetos afiados ou pontiagudos para limpeza!

Aviso • Não limpe o otoscópio em banho de ultra-sons e não esterilize o otoscópio a gás ou em autoclave!

1. Desligue o AURICAL OTOcam 300 do computador.
2. Use um pano macio e ligeiramente humedecido com uma pequena quantidade de detergente suave para limpar a caixa, a cabeça da câmara, as fichas e o cabo.

Atenção • Não permita humidade dentro do dispositivo!

3. Se a superfície de vidro da lente estiver muito suja, use um disco de algodão com álcool para a limpar.
4. Depois de limpar, remova completamente os agentes de limpeza limpando com um pano humedecido em água pura desionizada.
5. Finalmente, seque cuidadosamente todas as superfícies do AURICAL OTOcam 300 e a superfície de vidro da lente com um pano macio.

Limpar acessórios

Espéculos

Os espéculos são descartáveis e não devem ser limpos nem reutilizados.

Não existem requisitos especiais para a eliminação dos espéculos.

10 Outras referências

Depois de instalar o OTOSuite, poderá encontrar os manuais do OTOSuite e informação relacionada no seu PC. No menu **Iniciar (Start)**, abra **OTOSuite Manuals** que contém uma visão geral com ligações para todos os manuais.

11 Acessórios

Nome do Acessório	Número da Peça
Suporte de mesa	8-35-30800
Software PC OTOSuite	8-49-75800
Espéculos, normais (12 pcs)	8-62-42700
Espéculos, com gestão de cerúmen (12 pcs)	8-62-42710

12 Especificações Técnicas

Identificação do tipo

AURICAL OTOCam 300 é do tipo 1076 de GN Otometrics A/S.

Sistema de vídeo

Sensor	Sensor de Imagem Digital CMOS de 0,3 polegadas
Sistema de Lente	10 micro-lentes com foco fixo com grande profundidade de campo
Resolução do sensor	720 (H) x 720 (V) pixels
Taxa de imagens	24 quadros/segundo
Sinais de saída	USB 2.0

Dados ópticos

Distância mínima de trabalho	10 mm (0,4 polegadas)
------------------------------	-----------------------

Pré-aquecedor

O pré-aquecedor está ativo quando o AURICAL OTOCam 300 está ligado ao PC e colocado no suporte.

Ativação do pré-aquecedor	Ativada pelo íman no suporte.
Potência do pré-aquecedor	Aquece a ponta distal da câmara aproximadamente +5 °C (9 °F) acima da temperatura ambiente após 5 minutos de ativação

Botões

Parar imagem	Ouvido direito/esquerdo
--------------	-------------------------

Dados elétricos

Tensão de alimentação através de porta USB

Potência de entrada USB 2.0, máx. 500 mA.

Fonte de luz 2 LEDs, guia de luz de fibra óptica

Ficha USB USB, tipo A (fonte de alimentação de LED/câmara/pré-aquecimento)

Interruptor ativado por contacto do íman utilizado para alternar entre o pré-aquecimento e a luz.

Dados mecânicos

Comprimento do cabo 2950mm (9,65 pés)

Comprimento sem cabo 170mm (6,7 polegadas)

Peso incluindo cabo 225 g (8 onças)

Diâmetro maior 45 mm (1,8 polegadas)

Diâmetro distal máx. 3,4 mm (0,134 polegadas)

Peso total 1300 g

Vida útil

Vida útil esperada 5 anos

Ambiente de armazenamento

Temperatura -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Ambiente de funcionamento

Temperatura +10 °C a +30 °C (+50 °F a +86 °F)

Humidade do ar 30% a 75%, sem condensação

Pressão atmosférica 600 hPa a 1060 hPa

Tempo de aquecimento

Tempo de aquecimento <20 segundos

Nota • Para que o pré-aquecedor aqueça a ponta da câmara à temperatura do corpo, o AURICAL OTOcam 300 deve permanecer no suporte (ligado a um PC ligado) no mínimo durante 5 minutos antes de utilizar a câmara. O tempo deve ser prolongado se o AURICAL OTOcam 300 tiver estado armazenado num ambiente frio.

Normas

Segurança do Paciente • IEC 60601-1, Classe II, parte aplicada Tipo BF;

• UL60601-1; CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90

CEM IEC 60601-1-2

Segur

Classe de proteção	II IEC 60601-1, IPX0
Classe de aplicação	BF

Requisitos do sistema

Para saber quais os requisitos do sistema, consulte a ficha de dados do OTOSuite.

13 Fabricante

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
☎ +45 45 75 55 55
✉ +45 45 75 55 59
www.otometrics.com

13.1 Responsabilidade do fabricante

O fabricante é considerado responsável pelos efeitos relacionados com a segurança, fiabilidade e desempenho do equipamento apenas se:

- Todas as operações de montagem, extensões, regulações, modificações ou reparações forem efetuadas pelo fabricante do equipamento ou por pessoal autorizado pelo fabricante.
- A instalação elétrica à qual o equipamento está ligado cumprir os requisitos de EN/IEC.
- O equipamento for usado de acordo com as instruções de uso.

O fabricante reserva-se o direito de negar qualquer responsabilidade pela segurança de funcionamento, fiabilidade e desempenho do equipamento mantido ou reparado por outras partes.

14 Notas de aviso

Este manual contém informação e avisos que devem ser respeitados para assegurar o desempenho seguro dos dispositivos e software abrangidos por este manual. As regras e regulamentos locais, caso se apliquem, também devem ser sempre cumpridos.



Se o módulo de Vídeo de Otoscopia for utilizado em conjunto com um dispositivo (incluindo dispositivos além dos produzidos pela Otometrics), assegure-se de que são seguidas todas as informações e avisos na documentação do dispositivo.



Aviso • Não olhe diretamente para o feixe de luz, nem aponte o feixe de luz na direção dos olhos de outras pessoas. O feixe de luz pode danificar os olhos.



Aviso • Para garantir a proteção continuada contra perigo de incêndio, substitua os fusíveis apenas por fusíveis do mesmo tipo e classificação.


- Não utilize o equipamento na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambientes ricos em oxigênio.
 - Nenhuma peça pode ser aquecida, queimada ou utilizada de qualquer modo para finalidades diferentes das aplicações definidas na secção Finalidade de utilização deste manual.
 - Por razões de segurança e devido aos efeitos sobre a CEM, os acessórios ligados à instalação de saída do equipamento devem ser idênticos aos do tipo que é fornecido com o sistema.
 - Esta classe de equipamentos é permitida em estabelecimentos domésticos se for usada sob a jurisdição de um profissional de cuidados de saúde.
 - Pode ocorrer ruído indesejável se o dispositivo for exposto a um campo radioelétrico forte. Esse ruído pode interferir com o desempenho do dispositivo. Muitos tipos de dispositivos elétricos, por exemplo, telemóveis, podem gerar campos radioelétricos. Recomendamos que a utilização desses dispositivos na proximidade do AURICAL OTOcam 300 seja restringida.
 - As emissões RF do AURICAL OTOcam 300 são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrónico nas imediações. Contudo, os dispositivos locais na proximidade do AURICAL OTOcam 300 podem ser alvo de um efeito negativo ou perda de funcionalidade..
 - É recomendado que instale a unidade num ambiente que minimize a quantidade de eletricidade estática. Por exemplo, é recomendado um tapete antiestático.
 - Para evitar a infeção cruzada ou a reinfecção, os espéculos devem ser eliminados após cada utilização.
 - Os danos acidentais e o manuseamento incorreto podem ter um efeito negativo na funcionalidade do dispositivo. Contacte o seu fornecedor para obter aconselhamento.
 - AURICAL OTOcam 300 destina-se a ser utilizado por audiologistas e outros profissionais de saúde qualificados para inspecionar visualmente o canal auditivo e a membrana do tímpano.
 - Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas na secção Finalidade. Por exemplo, não utilize o dispositivo para examinar cavidades nasais, olhos ou a laringe.
 - Não armazene nem opere o AURICAL OTOcam 300 com temperatura e humidade superiores às indicadas nas Especificações técnicas. O não cumprimento destas indicações pode ter efeitos negativos sobre o desempenho e/ou causar a degradação dos componentes do dispositivo.
 - Tenha cuidado ao inserir o espéculo no ouvido do paciente - existe o risco de danificar a parede do canal auditivo e/ou a membrana do tímpano. Não aplique força excessiva no ouvido externo com o espéculo.
-  Ao ligar outros equipamentos elétricos a AURICAL OTOcam 300, lembre-se de que os equipamentos que não cumpram as mesmas normas de segurança que AURICAL OTOcam 300 podem causar uma redução geral do nível de segurança do sistema. O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60950.
-  Ao seleccionar os acessórios ligados ao AURICAL OTOcam 300, devem ser tidos em conta os seguintes pontos:
- Utilização de equipamento ligado num ambiente com pacientes
 - Prova de que o equipamento ligado foi testado de acordo com IEC60601-1 e/ou IEC60601-1-1
- Mantenha a unidade afastada de líquidos. Não deixe criar humidade dentro da unidade. A humidade no interior da unidade pode danificar o instrumento e resultar num risco de choque elétrico para o utilizador ou paciente.

15 Notas sobre CEM (compatibilidade eletromagnética)

AURICAL OTOcam 300 faz parte de um sistema médico elétrico, estando assim sujeito a precauções especiais de segurança. Por este motivo, as instruções de instalação e de funcionamento fornecidas neste documento devem ser seguidas atentamente. Os dispositivos de comunicação de alta-frequência portáteis e móveis, tais como telemóveis, podem interferir com o funcionamento do AURICAL OTOcam 300.

Orientações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas		
AURICAL OTOcam 300 é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do AURICAL OTOcam 300 deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.		
Teste de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	AURICAL OTOcam 300 utiliza energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrónico nas imediações.
Emissões RF CISPR 11	Classe B	AURICAL OTOcam 300 é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os relacionados diretamente com redes públicas de alimentação de baixa tensão que abastecem edifícios de habitação.
Emissões de harmónicas IEC 61000-3-2	Não aplicável	
Flutuações de tensão/cintilação IEC 61000-3-3	Não aplicável	

Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas			
AURICAL OTOcam 300 é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do AURICAL OTOcam 300 deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.			
Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
Descarga eletrostática (DES) IEC 61000-4-2	+/- 6 kV contacto +/- 8 kV ar	+/- 6 kV contacto +/- 8 kV ar	O chão deve ser de madeira, betão ou azulejo cerâmico. Se o chão for coberto com material sintético, a humidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.
Campo magnético da frequência de alimentação (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Os campos magnéticos da frequência de potência devem ter níveis característicos de um local normal num ambiente comercial ou hospitalar normal.
Nota • U_r é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.			

Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética - para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte vital			
AURICAL OTOCam 300 é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do AURICAL OTOCam 300 deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.			
Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
RF radiada IEC 61000-4-3	150 kHz a 80 MHz fora das bandas ISM 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis não deverão ser utilizados mais perto de qualquer parte do AURICAL OTOCam 300, incluindo cabos, do que a distância calculada pela equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de segurança recomendada: $d = 1,2 \sqrt{P}$ para 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ para 80 MHz a 2,5 GHz, onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de segurança recomendada em metros (m). As forças de campo dos transmissores de RF fixos, de acordo com o determinado por um inquérito eletromagnético local, ^a deverão ser inferiores ao nível de conformidade de cada gama de frequência. ^b Pode ocorrer interferência na proximidade do equipamento marcado com este símbolo: 
<p>Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de segurança para a gama de frequência mais elevada.</p> <p>Nota 2: Estas diretivas podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.</p> <p>a. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (telemóveis/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores, emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o AURICAL OTOCam 300 é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá certificar-se do funcionamento correto do AURICAL OTOCam 300. Se forem observados desempenhos anormais, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do AURICAL OTOCam 300.</p> <p>b. Acima da gama de frequência 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.</p>			






Distâncias de segurança recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o AURICAL OTOCam 300.			
O AURICAL OTOCam 300 destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o utilizador do AURICAL OTOCam 300 pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis (transmissores) e o AURICAL OTOCam 300, segundo o recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.			
Potência nominal máxima de saída do transmissor W	Distância de segurança de acordo com a frequência do transmissor m		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23




Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de segurança d recomendada em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de segurança para a gama de frequência mais elevada.

Nota 2: Estas diretivas podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

16 Definição de símbolos

	Cumpra os requisitos de Tipo BF da IEC60601-1.
	Está em conformidade com a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE e a Diretiva RoHS (2011/65/CE).
	Consulte os avisos e precauções no manual do utilizador.
	Siga as instruções de utilização.
	Cumpra os requisitos da Classe II da norma de segurança IEC 60601-1.

	MÉDICO - Equipamento Médico Geral em relação a choques elétricos, incêndio e perigos mecânicos apenas de acordo com a UL 60601-1, primeira edição, 2003 CAN/CSA-22.2 N.º 601.1-M90.
	<p>Equipamento elétrico abrangido pela Diretiva 2002/96/EC sobre eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE).</p> <p>Todos os produtos elétricos e eletrónicos, baterias e acumuladores deverão ser separados no final da sua vida útil. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não elimine estes produtos como resíduos domésticos não separados.</p> <p>Pode devolver o seu dispositivo e acessórios à Otometrics ou a qualquer fornecedor de Otometrics. Pode também contactar as autoridades locais para obter conselhos sobre a eliminação.</p>
	Utilizado nos diálogos de mensagens de erro se o programa de software falhar. Consulte a informação detalhada na caixa de diálogo.