

# AURICAL<sup>®</sup> OT0cam 300

## AURICAL OT0cam 300 インストールの推奨事項

文書No. 7-50-1380-JA/01  
品番 7-50-13800-JA

## インストールの推奨事項

AURICAL OT0cam 300をお買い上げいただきありがとうございます。OT0cam 300の最高の性能を引き出すため、次のインストール推奨事項をごらんください。


### USBのセットアップ

OT0cam 300が機能するためにはUSB2.0ポートまたはUSB3.0ポートが必要です。USB帯域幅が制限されている場合、AURICAL OT0cam 300が適切に動作しない場合があります。

### 最適なUSBポートの見つけ方



青いUSB (3.0) ポートが推奨です。

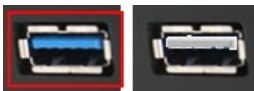

外部USBハブを使わないでください。



USB延長ケーブルを使わないでください。



### Windowsの推奨事項

オペレーティングシステムにすべての更新が適用されていることを確認してください。

- 各グラフィックドライバーの製造メーカーのホームページで更新を確認し、更新があればインストールします。

## OT0suiteのビデオ耳鏡検査法のキャプチャースクリーンに何も表示されない場合

OT0suiteのビデオ耳鏡検査法のキャプチャースクリーンに黒い写真が表示される場合は、カメラをクレードルから外してPCのUSBポートに差し込んだ時に、カメラ光源がオンであることを検証してください。光源がオンでない時は、代理店にご連絡ください。

光源がオンである場合は次をお試しください。

1. 写真を右クリックしてこのメニューを表示します。

Show full screen image	Alt+Enter	
Resolution	Colors [bits]	Framerate [1/s]
800x800	16	24
720x720	16	24
650x650	16	24
550x550	16	24
200x200	16	24

**注記** ・ デフォルト解像度は720x720で、ほとんどのコンピュータで機能します。

2. 写真が表示されるまで解像度を下げます。
3. 最低の解像度「200x200」まで下げても機能しない場合は、コンピュータのグラフィックカードドライバを更新するか、可能であれば別のグラフィックカードに切り替えます。
4. 解像度720x720以下で正しい写真が表示される場合は、利用できるUSB帯域幅に制限がありますので、別のUSBポートをお使いください。
5. どのUSBポートでも解像度720x720で写真が得られない場合は、携帯電話、USBモデムなどの重要でないUSB機器を外してください。

**注記** ・ 一部のUSB機器は内部的に接続されており、メニュー、ショットカット、ボタン、コントロールパネル、デバイスマネージャーを通じてのみ非アクティブ化できます。

### 上級ユーザー向け

USB機器を外しても効果がないときは、デバイスマネージャーで写真が表示されるまで1つずつUSB機器を無効にしてください。

**注記** ・ 一部のデバイスは使われない時でもUSB帯域幅を予約しています。

---

**著作権表示**

© 2013, 2016 GN Otometrics A/S. 不許複製。® Otometrics、Otometricsアイコン、AURICAL、MADSEN、ICS、およびHORTMANNIはアメリカ合衆国およびその他の国におけるGN Otometrics A/Sの登録商標です。

**バージョンリリース日付**

2016 年 09 月 30 日 (143310)

**技術サポート**

販売店へご連絡ください。