



### 按键功能

上方向键	升高通道1声强 (见 a, 见 b)
下方向键	降低通道1声强 (见 a, 见 b)
左方向键	降低频率 (见 c)
右方向键	升高频率 (见 c)
空格键	开启通道1 (在启用反转给声模式时为关闭)
AltGr	暂时打开掩蔽声/刺激声 2 (反向模式下关闭)
N	通道 1 持续给声 开启/关闭
M	通道 2 持续给声 开启/关闭 (典型掩蔽)
S	储存当前点 按住 S 键在不同存储符号间切换, 无响应 → 限制响应 → 不显示符号
F5	语音播放器播放
Esc	语音播放器停止
T	阈值或言语接受阈

- (a) 操作将取决于“箭头键的级别说明” — 工具>选项  
 (b) Shift 键 + 键 = 掩蔽/刺激声 2  
 (c) 频率会在边缘换行

### 按键功能

L	通道1左通道开启 (见 d)
R	通道1右通道开启 (见 d)
B	通道1双通道开启 (见 d)
C	舒适阈
U	不适阈
D	言语察觉阈
W	词识别率/句识别率

- (d) 对侧掩蔽。如果刺激声通道从左变到右  
 或从右变到左, 则掩蔽声通道会同时一  
 样变化, 从而保持同侧掩蔽状态

### 输出传感器

5	插入式耳机
6	耳机
7	高频耳机
8	骨导振荡器
9	声场

### 数字键盘

1-9	纯音: “快速选择” 面板
	言语: 音素/言语评分
+ / -	词语评分

### 信号选择

纯音测试	
1 = 纯音	
2 = 啜音	
言语测试	
1 = 麦克风 (实时语言测试)	
2 = 声源 A (录音)	
3 = 声源 B (录音)	

### 通信

F	对讲 (TF) (见 e)
P	应答级别 (TB) (见 e)

- (e) 按住可激活。  
 向上箭头键/向下箭头键用于调整输出  
 声级

● 键	刺激
● Shift 键 + 键	掩蔽/刺激声 2
● Ctrl 键 + 键	掩蔽
●	功能键

### 其他快捷键

新建测试组	Ctrl+N
患者信息	Ctrl+D
打开	Ctrl+O
保存	Ctrl+S
打印	Ctrl+P
退出	Alt+F4
前一测试组	PgUp
下一测试组	PgDn
测听属性	Ctrl+U
切换刺激耳	Ctrl+E
选项	Ctrl+M
鼠标右键菜单	Delete
测试选择器	F8
应答器 (测试模式)	F9
手动输入模式	F10