

AURICAL

## Maîtrisez parfaitement votre formule d'appareillage

### Custom Target

Aurical évolue constamment et Custom Target n'est qu'un composant parmi tant d'autres qui vous mèneront vers l'appareillage du futur.


**Nous nous soucions des personnes** Processus d'appareillage simple d'utilisation, Aurical offre une expérience professionnelle et intuitive à vos clients.

**Nous comprenons vos besoins** Fondé sur les nombreux retours des utilisateurs, Aurical a été conçu pour vous aider de manière flexible et efficace.

**Nous innovons véritablement** Rien n'est établi. Avec Aurical, vous êtes libre de définir vos propres stimulus, cibles et protocoles afin de bénéficier d'une expérience complètement personnalisée.

**Nous nous engageons pour votre futur** Lancée il y a plus de 50 ans, notre marque est connue pour sa lignée de découvertes. Cette fière et longue tradition nous accompagne sur la voie du futur.



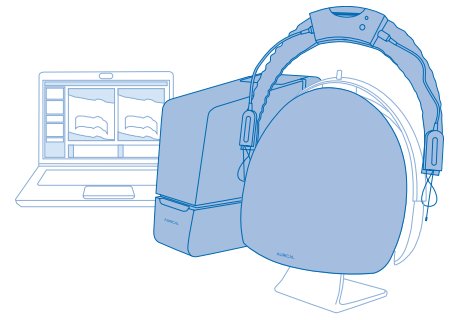

# Custom Target

## Maîtrisez parfaitement votre formule d'appareillage

Aurical Freefit propose une large sélection de règles cibles destinées à la vérification de l'appareillage et désormais vous pouvez développer votre propre formule de calcul de la cible.

La nouvelle fonction Custom Target de l'Aurical vous offre la polyvalence nécessaire pour réaliser des procédures spécifiques en vous permettant d'appliquer votre propre règle cible de prescription ou vos propres valeurs prédites pour le gain in vivo non assisté (REUG) ou la différence coupleur-in vivo (RECD).


Le résultat est une variété quasi illimitée d'approches d'appareillage, qui vous permet de définir vos propres protocoles. Pour cela, il vous suffit de créer votre formule d'appareillage personnalisée dans Excel® à l'aide de notre feuille Custom Target. Plus besoin de compétences en programmation.

	125 Hz	160 Hz	200 Hz	250 Hz	315 Hz	400 Hz	500 Hz	630 Hz	750 Hz	800 Hz	1 kHz	1.25 kHz	1.5
7. Audiogram HTL Level	15	15	15	15	18,1342	21,7807	25	26,6671	27,9248	28,3904	30	33,2193	35
8. Audiogram HTL status	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Audiogram UCL Level	77,1	77,1	77,1	77,1	82,9683	89,0341	94,7	97,131	99	99,1346	99,6	98,9346	
10. Audiogram UCL status	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Audiogram BC Level	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
12. Audiogram BC status	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13. Audiogram HTL Level Opposite Ear	15	15	15	15	20,0014	25,1711	30	31,6671	32,9248	33,3904	35	36,6096	37
14. Audiogram HTL status Opposite Ear	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Audiogram UCL Level Opposite Ear	77,1	77,1	77,1	77,1	83,2017	89,5087	95,4	98,193	100,3	100,412	100,8	99,9195	
16. Audiogram UCL status Opposite Ear	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Audiogram BC Level Opposite Ear	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
18. Audiogram BC status Opposite Ear	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

La nouvelle formule est créée facilement avec la feuille Excel dans Aurical.


\*Excel® est une marque déposée de Microsoft® Corporation.

La nouvelle formule est importée naturellement par Otosuite® et est disponible instantanément dans l'arborescence de menu habituelle à côté des règles cibles intégrées. Pour plus de cohérence et un partage des meilleures pratiques au sein de l'établissement, elle peut bien évidemment être mise à disposition dans toutes les installations Otosuite et incluse dans la fonctionnalité Tests utilisateur d'Otosuite de façon simple et intuitive.

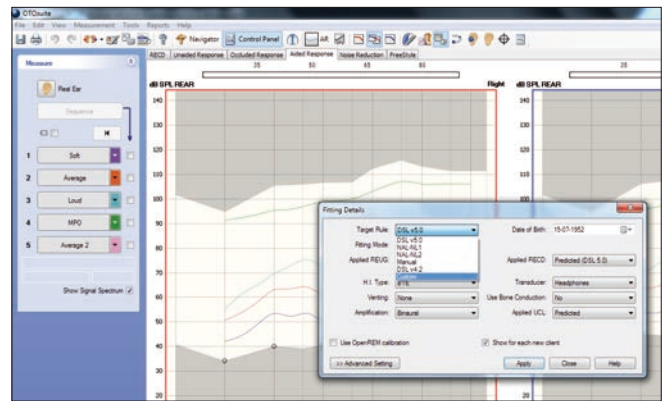

La nouvelle formule est importée automatiquement par Otosuite.

La formule d'appareillage personnalisée peut être combinée avec les fichiers de stimulus personnalisés et la fonctionnalité OnTarget afin de créer une solution exacte et vraiment flexible pour ceux qui souhaitent maîtriser parfaitement leur processus d'appareillage et de vérification.

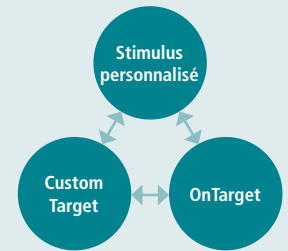

Pour en savoir plus sur Aurical, contactez votre représentant local Natus dès aujourd'hui ou visitez la page [hearing-balance.natus.com/aurical](http://hearing-balance.natus.com/aurical)

## Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !

©2021 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits apparaissant sur ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues, concédées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 7-26-1620-FR Rev03

**natus**®

Natus Medical Incorporated

[natus.com](http://natus.com)