



Verbessern Sie das Leben Ihrer Tinnitus-Patienten noch heute

Tinnitus ist ein zunehmendes Problem und betrifft Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Es gibt zwar kein Heilmittel für Tinnitus, doch gibt es Möglichkeiten, Patienten beim Management ihrer Symptome zu helfen. Eine Tinnitus-Beurteilung ist der erste Schritt des Tinnitus-Managements.

Die Tinnitus-Testmodalität ist eine in Madsen Astera² integrierte Anwendung, die Ihre Möglichkeiten zur Beurteilung der Auswirkungen des Tinnitus auf das Leben Ihrer Patienten erweitert.

Statten Sie Ihre Klinik mit einem Audiometer auf PC-Basis aus

Beim Madsen Astera² handelt es sich um ein fortschrittliches klinisches 2-Kanal-Audiometer, das Präzision, Flexibilität und Effizienz bietet. Egal, ob Sie in einer großen Klinik oder einer kleinen Praxis arbeiten: Mit diesem Hochfrequenz-Audiometer mit integrierter Registerkarte zur Tinnitus-Bewertung kann Ihre Klinik das komplette Spektrum an Tinnitus-Beurteilungstests durchführen.




Drei Möglichkeiten, um Tinnitus-Patienten zu helfen

Beurteilung und Dialog spielen beim Tinnitus-Management eine wichtige Rolle. Madsen Astera² bietet die nötigen Tools, um Tinnitus-Beurteilungsprozesse zu straffen und Ihren Arbeitsablauf zu verbessern.



1. Komplettübersicht des Arbeitsablaufs bei der Tinnitus-Beurteilung

Mit Madsen Astera² sind Tinnitus-Beurteilungen ganz einfach. Öffnen Sie das dazugehörige Tinnitus-Modul über die Tinnitus-Registerkarte ganz oben auf der Seite und greifen Sie direkt auf alles zu, was Sie für eine vollständige Tinnitus-Beurteilung benötigen. Messen Sie Tonhöhen-Matching links, rechts und binaural, Lautstärkenvergleich, Hörschwellen, Mindest-Vertäubungspegel, Residuale Inhibition und mehr mithilfe des Tinnitus-Beurteilungsrasters. Die Ergebnisse werden automatisch in der Tabelle auf der Seite angezeigt und gespeichert.

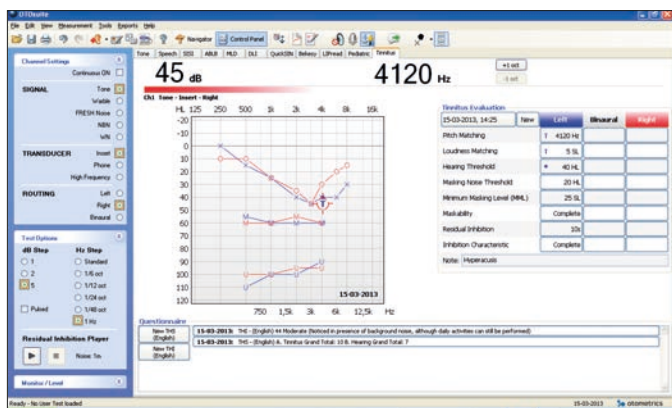

Lösungen für das Gesundheitswesen mit einem Ziel. Das Beste für Sie.


©2021 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. 7-26-9077-DE Rev06

2. Fragebogen mit automatischer Klassifizierung

Die Fragebögen Tinnitus-Handicap-Inventar (Tinnitus Handicap Inventory, THI), Tinnitus-Funktionsindex (TFI) und Tinnitus- und Gehörumfrage (Tinnitus and Hearing Survey, THS) sind vollständig integriert und können auf dem Computerbildschirm oder einem Touchscreen ausgefüllt werden. Der Score wird automatisch berechnet und es wird eine vordefinierte Beschreibung angezeigt. Die Daten werden als separate Fragebogeneinträge in Noah gespeichert.

3. Tinnitus-Bericht

Ein vollumfänglicher Tinnitus-Bericht steht zur psychoakustischen Beurteilung zur Verfügung. Er umfasst ein Audiogramm mit Tinnitus-Markern, eine Tabelle mit Frequenz- und Lautstärkenvergleich, Mindest-Vertäubungspegel und Residuale Inhibition. Im Bericht ist auch ein Tinnitus-spezifischer Hinweis enthalten. Die Tinnitus-Beurteilungsdaten können auf fokussierte Weise mithilfe einer historischen Tinnitus-Datenübersicht (psychoakustische und Fragebogendaten) visualisiert und geteilt werden.

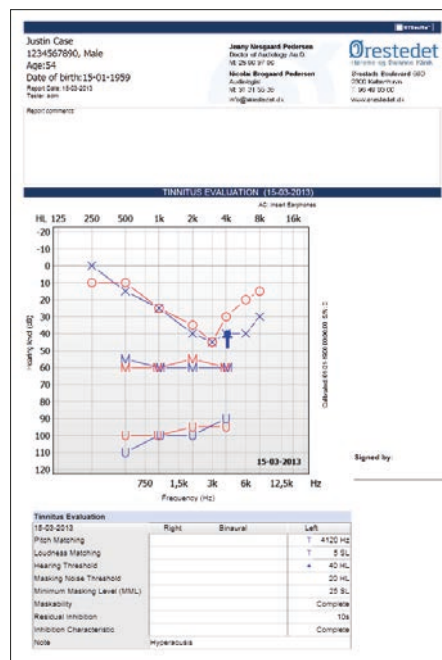

Lernen Sie das Tinnitus-Modul für Madsen Astera² von Natus noch heute kennen und nutzen Sie es bei der Behandlung von mehr Tinnitus-Patienten. Weitere Informationen finden sie unter hearing-balance.natus.com.