

## Preparação

1. NÃO teste em uma sala com escuridão total. Embora possa NÃO parecer intuitivo, para obter os melhores resultados, a luz ambiente da sala é benéfica para a obtenção de um ambiente de teste completamente leve e estanque para o paciente.
2. Para pacientes com pestanas longas, é aconselhável remover qualquer máscara. A máscara depositada no interior da janela preta do copo direito do olho (através do qual a pupila é rastreado e o olho é gravado) afeta adversamente o acompanhamento da pupila e a gravação do olho.

### **Importante** • NÃO TOQUE NA JANELA PRETA

Ao manusear o copo do olho direito, NÃO toque na janela preta. Os óleos na pele reduzem a eficácia do revestimento antiembaçante na janela. Impressões digitais dificultam a localização da pupila.

3. Obtenha uma solução de visão negada (inclui um copo para o olho direito e uma proteção para o olho esquerdo).

Copo do olho direito



Proteção do olho esquerdo

4. Informe o paciente de que ele estará em completa escuridão por um período curto. Certifique-se de que, apesar de não conseguir ver, a câmara nos óculos de proteção continua a registrar o movimento dos olhos.

### Como fixar o copo do olho direito


1. Remova a proteção de plástico da parte de trás do copo. Remova com cuidado para não rasgar o copo, nem retirar o adesivo do copo.
2. Peça ao paciente para abrir o olho bastante.

**Observação** • É mais fácil posicionar o copo se você e o paciente estiverem sentados no mesmo nível, em vez de você estar em uma posição mais elevada do que o paciente.

3. Peça ao paciente para olhar diretamente para a frente. Você quer que a pupila esteja no centro da janela preta.
4. Se a pálpebra do paciente cair, segure a pálpebra ao colocar o copo. Isso ajudará a manter o olho do paciente aberto durante o teste.
5. Dobre para trás a extremidade interior do copo, colocando a saliência contra o lado direito do nariz.



A. Saliência

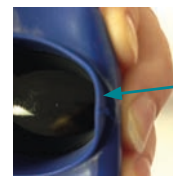

B. Dobre na borda da saliência

6. Certifique-se de que o copo esteja centralizado sobre o olho (e não inclinado para cima ou para baixo).

### **IMPORTANTE** • NÃO TOQUE NA JANELA PRETA

Ao manusear o copo do olho direito, NÃO toque na janela preta. Os óleos na pele reduzem a eficácia do revestimento antiembaçante na janela. Impressões digitais dificultam a localização da pupila.

7. Pressione suavemente à volta das extremidades para se certificar de que uma vedação tenha se formado em toda a volta. Certifique-se de que o copo esteja bem apertado.

### Como fixar a proteção do olho esquerdo

1. Remova a capa de plástico da parte traseira da proteção.
2. Peça ao paciente para fechar seu olho.
3. Posicione a proteção com o lado mais largo voltado para o nariz. Certifique-se de que o remendo esteja centralizado sobre o olho (e NÃO inclinado para cima ou para baixo).
4. Pressione suavemente à volta das extremidades para se certificar de que uma vedação tenha se formado em toda a volta. Certifique-se de que o remendo esteja bem apertado.

# ICS® Impulse Solução Vision Denied (Visão Negada) Quick Guide

## Verifique o aperto da luz

1. Dê ao paciente alguns minutos para que os olhos se ajustem.
2. Pergunte ao paciente se consegue ver qualquer luz visível. NÃO olhe diretamente para uma lâmpada (foco, halogênio, incandescente).
3. Com o copo da visão negada e a proteção bem fixos e o paciente incapaz de detectar luz, prossiga com a colocação dos óculos no paciente.

## Colocação dos óculos sobre a solução de visão negada


**Observação** • Antes de colocar os óculos sobre a solução de visão negada, certifique-se de que os óculos tenham uma nova almofada de face não utilizada.

1. No software vestibular Otosuite, abra um teste do grupo de teste **Oculomotor** ou **Positional** ou, do grupo de teste **Videos**, abra **Video Record/Playback**.
2. Posicione os óculos de proteção no paciente com o copo centralizado no interior dos óculos de proteção.
3. Aperte a fita de forma que os óculos de proteção permaneçam no paciente durante o teste, mas os óculos NÃO precisam estar tão apertados quanto necessário para o teste de impulso da cabeça.


**Observação** • A correia deve estar apenas suficientemente apertada para que os óculos permaneçam em seu lugar durante os testes (nistagmo espontâneo, olhar, posicional). Você não deve apertar a fita tão apertada quando deveria para o teste de impulso da cabeça. Uma fita demasiado apertada empurra a solução de visão negada para o rosto, causando desconforto, o que torna a gravação do movimento dos olhos mais difícil.

4. Verifique se o olho está centralizado no interior da janela do copo.

Posição boa

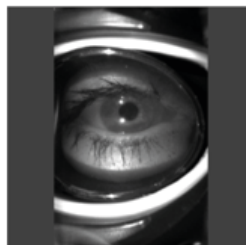

Posição ruim

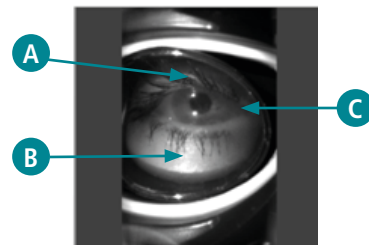

- A. Não centralizado verticalmente: Deve-se ver mais da pálpebra acima do olho.
- B. Não centralizado verticalmente: Deve-se ver menos da área abaixo do olho.
- C. Não centralizado horizontalmente: A borda interna do copo não está suficientemente próxima do nariz. Observe o canto do olho na borda do copo.

## Como remover o copo e a proteção da visão negada

**Observação** • A remoção lenta do copo e da proteção com visão negada é muito mais confortável do que a remoção rápida deles.

1. Peça ao paciente para fechar os olhos.
2. **Puxe LENTAMENTE** o copo e a proteção para fora da face do paciente.
3. Se necessário, solte o copo ou a proteção da face colocando uma pequena quantidade de água entre a solução de visão negada e a pele do paciente, facilitando a remoção.

Soluções de cuidados de saúde com uma coisa em mente. Você.

©2021 Natus Medical Incorporated. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos que aparecem neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de propriedade, licenciadas, promovidas ou distribuídas pela Natus Medical Incorporated, suas subsidiárias ou coligadas. 06/2021. 7-50-1131-BR Rev04. 7-50-11301-BR

**natus**®

Natus Medical Incorporated

natus.com